



## + Gebrauchsanweisung

### Geschlossenes Ernährungssystem

Die SmartFlex™ Verpackung wurde entwickelt, um eine einfache und sichere Verabreichung enteraler Ernährung in wenigen Schritten zu ermöglichen:

- Vor Gebrauch gründlich Hände waschen.
- Gut schütteln.
- Überprüfen, ob das Produkt optisch in Ordnung ist.
- Den kleinen Deckel abschrauben und den korrekten, festen Sitz des Weithalsadapters sicherstellen.
- Die (Roll-)Klemme am Set schliessen.
- Die Schutzfolie mit dem Spike-Anschluss durchstechen.
- Das Set mit einer Drehbewegung festschrauben.
- Den integrierten Aufhängehaken ausklappen.
- Den SmartFlex™ aufhängen.
- Ernährung starten.  
Rollklemme öffnen (falls vorhanden).



## + Mode d'emploi

### Alimentation en circuit fermé

L'emballage SmartFlex™ a été créé afin de simplifier et de sécuriser l'administration de la nutrition entérale en quelques étapes :

- 1  Se laver les mains avant utilisation.
- 2  Bien agiter.
- 3  Vérifier que l'aspect visuel du produit soit intact.
- 4  Dévisser le petit capuchon et vérifier que l'adaptateur à goulot large soit bien fixé.

- 5  Fermer la molette de la tubulure ou le clamp de Robson.
- 6  Percer l'opercule avec l'adaptateur spike.
- 7  Fixer la tubulure en vissant.
- 8  Déplier le crochet de suspension.
- 9  Suspendre le SmartFlex™.
- 10  Commencer l'alimentation. Ouvrir la molette (si la tubulure en comporte une).